

PREMIER

— *professional* —


Premier Beauty Expert Electric PRO- IS-260 kozmetički krevet




SPECIFIKACIJE



Premier-210, 230, 240

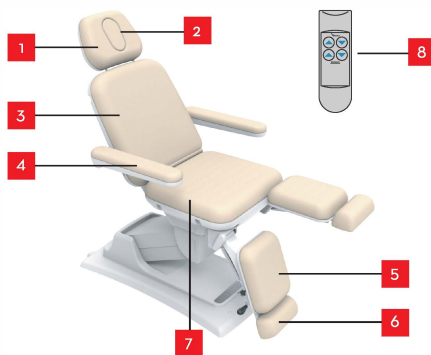

Premier-220, 260

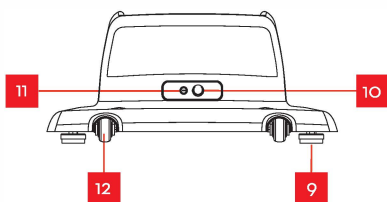

- | | | | |
|---|----------------------------|----|-----------------------|
| 1 | Naslon za glavu | 7 | Sedište |
| 2 | Umetak za rupu za disanje | 8 | Ručna kontrola |
| 3 | Naslon za leđa | 9 | Podesiva nožna pedala |
| 4 | Bočni nasloni za ruke | 10 | Prekidač |
| 5 | Oslonac za noge | 11 | Osigurač |
| 6 | Produžetak oslonca za noge | 12 | Točkovi |

TEHNIČKI PARAMETRI

Naziv proizvoda:	Premier Beauty Expert Electric PRO - IS-260 kozmetički krevet
Model:	Premier-210, Premier-220, Premier-230, Premier-240, Premier-260
Ulaz:	AC 110~250V, 50-60Hz
Izlaz:	DC 24V 1.8A
Temperatura okruženja:	0-40 °C
Snaga:	100W

ODRŽAVANJE, ČIŠĆENJE I SKLADIŠTENJE

- Koristite vlažan peškir da biste očistili uređaj i osušite ga mekom krpom.
- Nemojte koristiti alkohol niti alkoholni deterđent za brisanje ovog proizvoda.
- Dozvoljeno je koristiti malu količinu neutralnog deterđenta za brisanje proizvoda, a bilo kakva tečnost ne sme da prođe u opremu.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI



UPOZORENJE

Molimo pročitajte ovo Uputstvo pre bilo kakvog rada sa ovom opremom.

Koristite ovu opremu u skladu sa uputstvima u ovoj brošuri kako biste izbegli nezgode.

Samo obučeni kozmetičar može da koristi ovu opremu.

NEMOJTE odvrtni zavrtne niti pokušavati da razmontirate opremu.

Isključite uređaj i zaključajte ručnu kontrolu kada ne koristite uređaj.



INSTRUKCIJE ZA BEZBEDNOST

OPASNOST: DA BISTE UMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA, POŽARA I LIČNIH POVREDA, OVAJ PROIZVOD SE MORA KORISTITI U SKLADU SA SLEDEĆIM INSTRUKCIJAMA:

- Samo za upotrebu od strane obučениh kozmetičara.
- Pre upotrebe, **MORATE** proveriti da li je ova oprema postavljena na horizontalnu podlogu. **NEMOJTE JE KORISTITI** ako je na površini pod nagibom.
- Podesite četiri podesiva stopera kako bi neometano prianjali na tlo. Zatim pritisnite sva četiri čoška kozmetičkog kreveta kako biste proverili stabilnost kreveta.
- Ovo nije igračka. Molimo vas da decu držite dalje od ove opreme!
- Samo za unutrašnju upotrebu, ne izlažite opremu sunčevoj svetlosti.
- **NEMOJTE** izlagati ovu opremu ekstremnoj temperaturi ili vlažnom okruženju!
- Ne dozvolite da klijent leži direktno na dušek. Koristite peškir ili čaršav da biste zaštitili vinilni pokrivač.
- Molimo da koristite ovu opremu na u prostoriji gde ima dovoljno prostora za manevrisanje. Nemojte podizati krevet ili podešavati ugao nagiba ukoliko je to onemogućeno nedostatkom prostora.
- **NEMOJTE** ništa stavljati ispod kreveta ili iznad osnovne konstrukcije. Prilikom podizanja ili spuštanja kreveta ili podešavanja ugla naslona za leđa ili oslonca za noge, mora se proveriti da nema nikakvih prepreka u vidu stranih predmeta između dušeka i konstrukcije kreveta.
- Kada podižete krevet ili podešavate ugao naslona za leđa i oslonca za noge, uverite se da klijent bezbedno sedi na sedištu ili leži na dušek.
- **NEMOJTE** sedati na naslon za glavu, naslon za leđa, oslonac za noge ili bočni naslon za ruke.
- **NIKADA** nemojte stajati niti skakati po krevetu.
- Ova oprema se koristi samo za predviđenu svrhu ili za svrhu opisanu u ovom Uputstvu, i strogo je zabranjeno njeno korišćenje u bilo koje druge svrhe.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

- NEMOJTE da neovlašćeno osoblje rastavlja ili popravlja ovu opremu.
- NEMOJTE modifikovati niti prepravljati opremu.
- NEMOJTE koristiti ovu opremu u slučaju kvara!
- NEMOJTE koristiti vodu ili alkohol za čišćenje ove opreme!
- NIKADA ne stavljajte prste, ruku ili bilo koji drugi deo tela ispod naslona za leđa i oslonca za noge jer može doći do priklještenja.
- Ne potapajte opremu u vodu.
- Prilikom zamene osigurača, obavezno isključite uređaj iz struje i isključite prekidač za napajanje.

GARANCIJA

UKOLIKO U ZAKONSKOM ROKU OVAJ PROIZVOD NE BUDE RADIO USLED KVARA ELEKTRONSKIH KOMPONENATA ILI FABRIČKE GREŠKE, PREMIER ĆE POPRAVITI ILI ZAMENITI PROIZVOD, ILI NABAVITI POTREBNE KOMPONENTE BEZ NAKNADE TROŠKOVA.


OVA GARANCIJA NE OBUHVATA SLEDEĆE SLUČAJEVE:

- a) Štetu uzrokovanu nesrećom, zloupotrebom, nepravilnim rukovanjem ili transportom;
- b) Delove koji su bili podvrgnuti neovlašćenoj popravci;
- c) Nepravilnu upotrebu ovog uređaja;
- d) Štetu koja premašuje cenu samog proizvoda;
- e) Kvar isporučenog proizvoda kao rezultat nepropisnog skladištenja i/ili abnormalnih uslova korišćenja u prostorijama kupca;
- f) Nedostavljanje dokaza o datumu kupovine.



INSTRUKCIJE ZA KORIŠĆENJE

Uključivanje i isključivanje

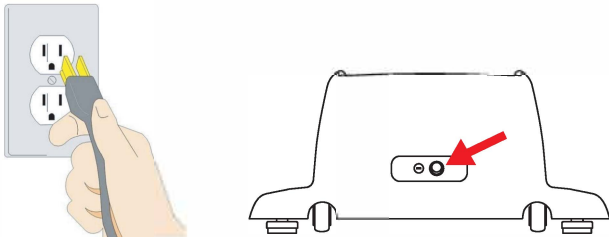

Prekidač za napajanje se nalazi u donjem delu na poledini opreme. Uključite strujni utikač u zidnu utičnicu, uključite opremu uključivanjem prekidača za napajanje. Da biste isključili opremu, isključite prekidač za napajanje i izvucite strujni utikač.

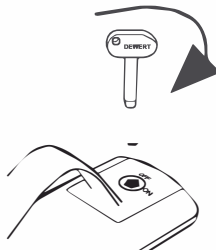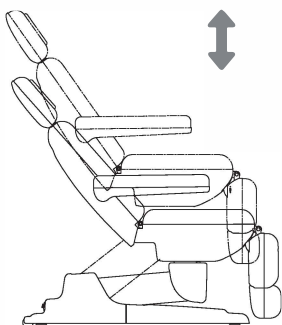



FUNKCIJA PODIZANJA



Otključajte ručnu kontrolu i nastavite da pritiskate dugme

 kako biste podigli krevet, a pritisnite dugme  da biste spustili krevet, sve dok krevet ne dostigne željenu visinu.


Električno kontrolisan naslon za leđa (za Premium modele 220, 230, 240 i 260)

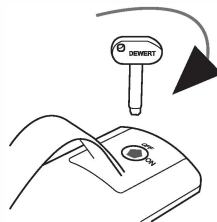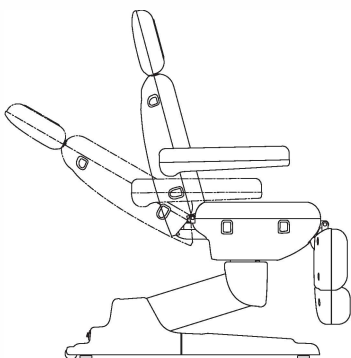

Otključajte ručnu kontrolu i nastavite da pritiskate dugme  za nagnjanje naslona, a pritisnite dugme  za spuštanje naslona za leđa, sve dok krevet ne dostigne željeni položaj.




INSTRUKCIJE ZA KORIŠĆENJE

Pneumatski kontrolisan naslon za leđa (samo za model Premium 210)

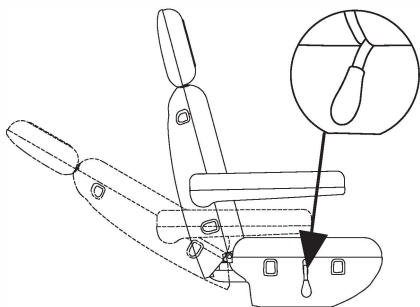



Podignite kontrolnu polugu pneumatske pumpe, lagano pritisnite nadole ili podignite naslon za leđa sve dok naslon ne dostigne željeni ugao, a zatim otpustite kontrolnu polugu. Za podešavanje ugla naslona za leđa dok klijent leži na kozmetičkom krevetu, uverite se da klijent sedi, kako ne bi došlo do prebrzog pada naslona i nanošenja povrede klijentu.

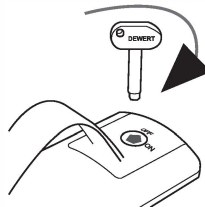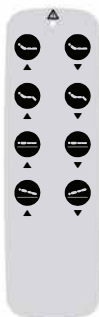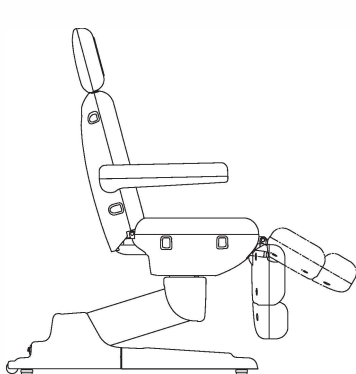
Električno kontrolisan oslonac za noge (samo za modele Premium 230 i Premium 240)



Otključajte ručnu kontrolu i nastavite da

pritisnete dugme  za nagnjanje oslonca, a pritisnete dugme  za spuštanje oslonca za noge, sve dok oslonac ne dostigne željeni ugao.


Pneumatski kontrolisan oslonac za noge (samo za modele Premium 220 i 260)

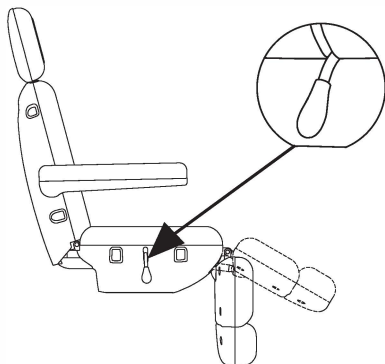



Podignite kontrolnu polugu pneumatske pumpe, lagano pritisnite nadole ili podignite oslonac za noge sve dok oslonac ne dostigne željeni ugao, a zatim otpustite kontrolnu polugu. Za podešavanje ugla oslonca za noge dok klijent leži na kozmetičkom krevetu, uverite se da je klijent podigao svoje noge, kako ne bi došlo do prebrzog pada oslonca i nanošenja povrede klijentu.


INSTRUKCIJE ZA KORIŠĆENJE

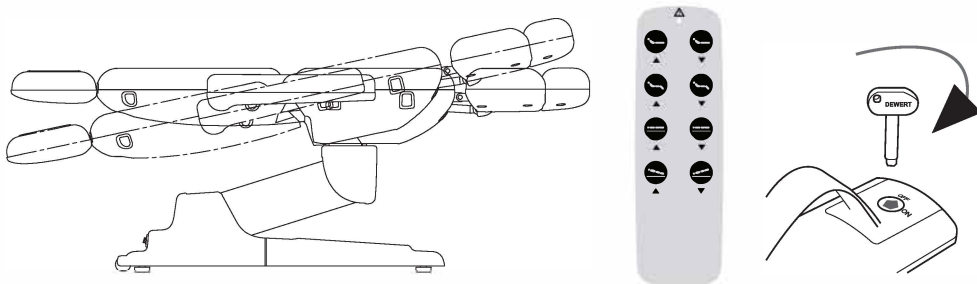Funkcija nagiba (samo za Premium 240 i Premium 260 modele)




Otključajte ručnu kontrolu i nastavite da pritisnete dugme  za nagnjanje kreveta nagore, a pritisnite dugme  za nagnjanje kreveta nadole sve do postizanja željenog ugla.

Produžetak oslonca za noge

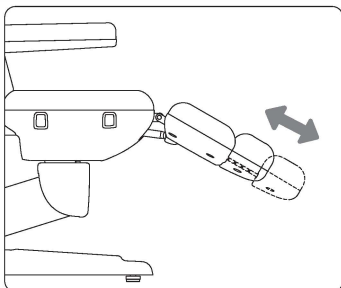

Povucite produžetak oslonca za noge ka spolja ili gurnite produžetak ka unutra da biste podesili željeni položaj.


Podešavanje naslona za glavu

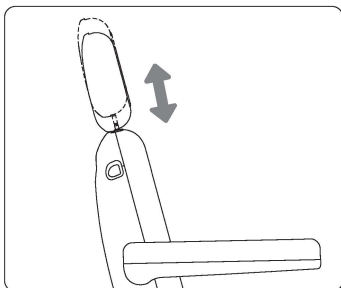

Povucite naslon za glavu ka spolja ili gurnite naslon ka unutra da biste podesili željeni položaj.


INSTRUKCIJE ZA KORIŠĆENJE

Skidanje i postavljanje naslona za ruke

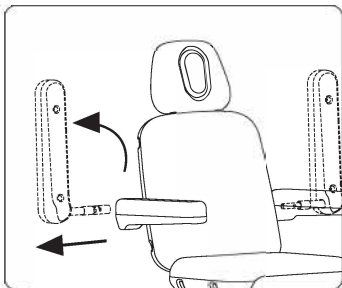

Podignite naslon za ruke do uspravnog položaja i izvucite naslon za ruke ka spolja. Prilikom postavljanja naslona za ruke, držite ugao naslona za ruke paralelno sa tlom, ubacite metalnu cev naslona za ruke u okrugli otvor na bočnoj strani naslona za leđa, a zatim podesite naslon za ruke u horizontalni položaj.

Zamena osigurača

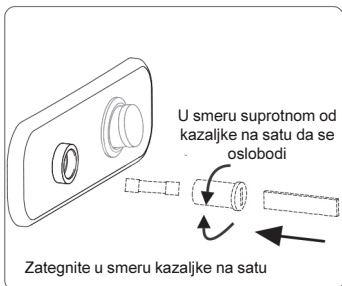

Prilikom zamene osigurača, obavezno isključite napajanje i isključite prekidač za napajanje.

U slučaju kvara funkcije električnog podizanja, molimo da proverite osigurač. Ako je osigurač pregoreo, zamenite ga novim. Koristite metalni novčić, metalni ključ ili neki tanak metalni predmet, pritisnite dugme u sredini otvora za montiranje osigurača i okrenite ga u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu, dok osigurač ne iskoči. Nakon što stavite novi 250V, 3A osigurač, vratite ga na mesto, pritisnite i okrenite dugme u smeru kretanja kazaljke na satu, sve dok se ne može više okrenuti.